



Скользящая простыня трансфер для перемещения больного используется в мед учреждениях и в домашних условиях. Применяется для комфортного и безопасного перемещения человека в кровати (поворачивание, перемещение к изголовью

кровати, переключивание с одной стороны поверхности на другую, смены постельного белья, а также проведения гигиенических процедур).

Скользящие простыни созданы в соответствии с лучшими клиническими рекомендациями безопасного перемещения пациентов. Полотна простыни изготовлены из прочной суперскользящей ткани и позволяют с легкостью перемещать даже самых крупных пациентов. Скользящая простыня имеет широкие надежные ручки - петли. Физическая помощь ухаживающих составляет более 50% общих усилий при перемещении. Скольжение ткани обеспечивает равномерное распределение веса больного и позволяет плавно перемещать его по любой ровной поверхности без дополнительных усилий.

Инструкция по использованию:

Оба полотна помещают под лежащего больного непосредственно перед началом перемещения. Для того чтобы подвинуть пациента необходимо потянуть на себя верхнее полотно. Благодаря супер-скользящей поверхности, даже самый грузный пациент легко перемещается по кровати. Очень удобны



два отдельных полотна для поворота пациента на 90°. Например, когда человека нужно посадить. После перемещения, простыню из-под больного вытаскивают, поскольку ткань синтетическая и не обеспечивает необходимой воздухопроницаемости для того, чтобы на ней лежать постоянно.

Особенности материалов:

Купить скользящую простыню можно в двух вариантах:

- Из 100% нейлона. Это гладкая, формоустойчивая, лёгкая парашютная ткань. Она устойчива к появлению загрязнений и влагонепроницаема.
- Из 100% полиэстера. Это лёгкая суперскользящая ткань, которая проста в уходе, не пропускает воду, быстро высыхает и не выгорает на солнце.

Размеры:

- Ширина стропы: не менее 25 мм.
- Размер каждого из двух полотен: в размере L - 172*65 см, в размере XL - 190*95 см.

Рекомендации по уходу и стирке

- Стирать при $t=40^{\circ}\text{C}$.
- Запрещено гладить.
- Дезинфицировать скользящую простыню для больных средствами, рекомендованными ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения", без содержания хлора в составе.
- Изделие можно обрабатывать мыльным раствором, затем насухо вытирать салфеткой.
- Перед каждым использованием простыню нужно проверять на целостность.